

藥物濫用檢測試劑



五合一快速檢驗試劑

聯準生技國際有限公司

04-23266366

Line ID: 0977689806

試劑使用流程

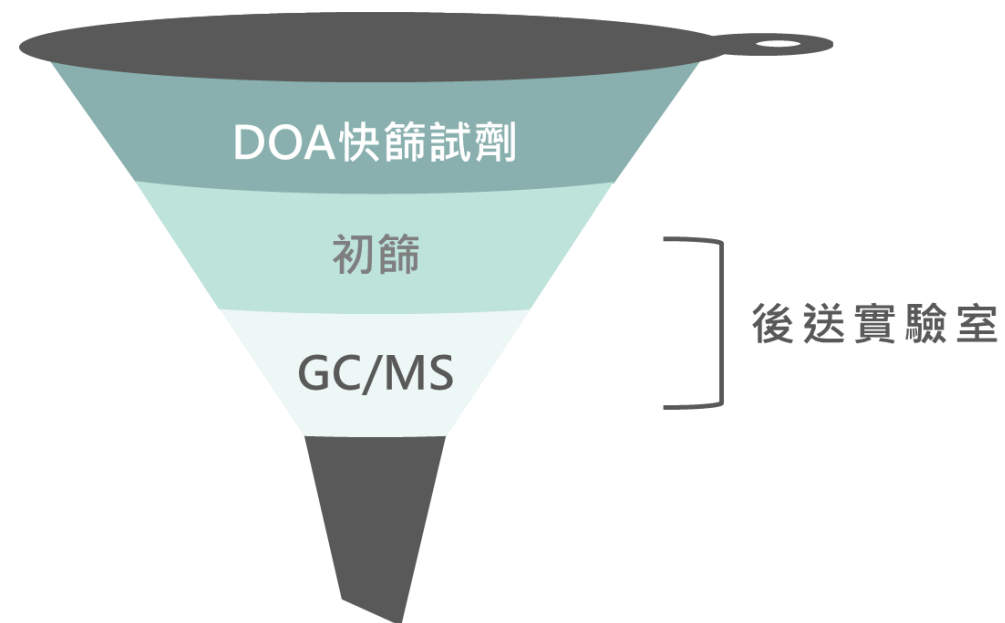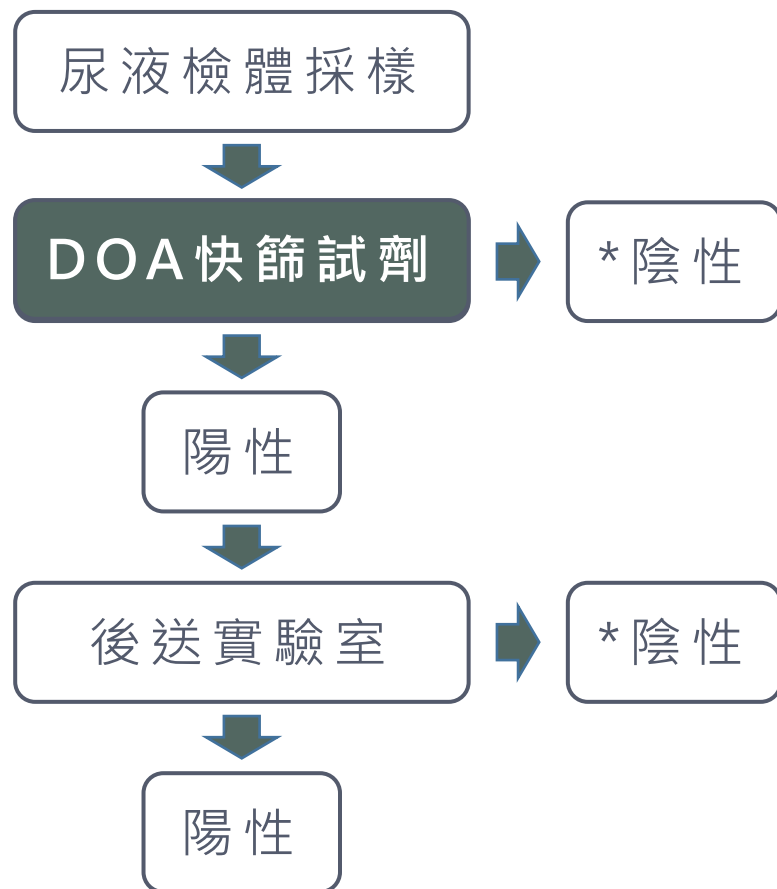

*陰性：無毒品反應 / 毒品濃度低於閾值

五合一試劑簡介



- 利用**免疫定性分析方法**，初步篩檢樣本中是否含有違禁藥物，以肉眼判讀結果。本測試匣可由一般人員**依需求選定測試毒品項目**。
- 可檢測項目與閾值

檢測項目	英文縮寫	閾值 (ng/mL)
大麻	THC	50
甲基安非他命	MET	500
愷他命	KET	100
苯二氮泮類	BZD (BZO)	300
辣大麻	K2	50


試劑組原理

- 競爭型免疫定性分析方法

檢體中的毒品與試劑T線上的物質共同競爭膠體金上抗體結合位置。

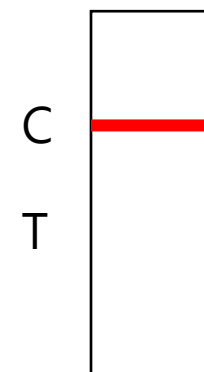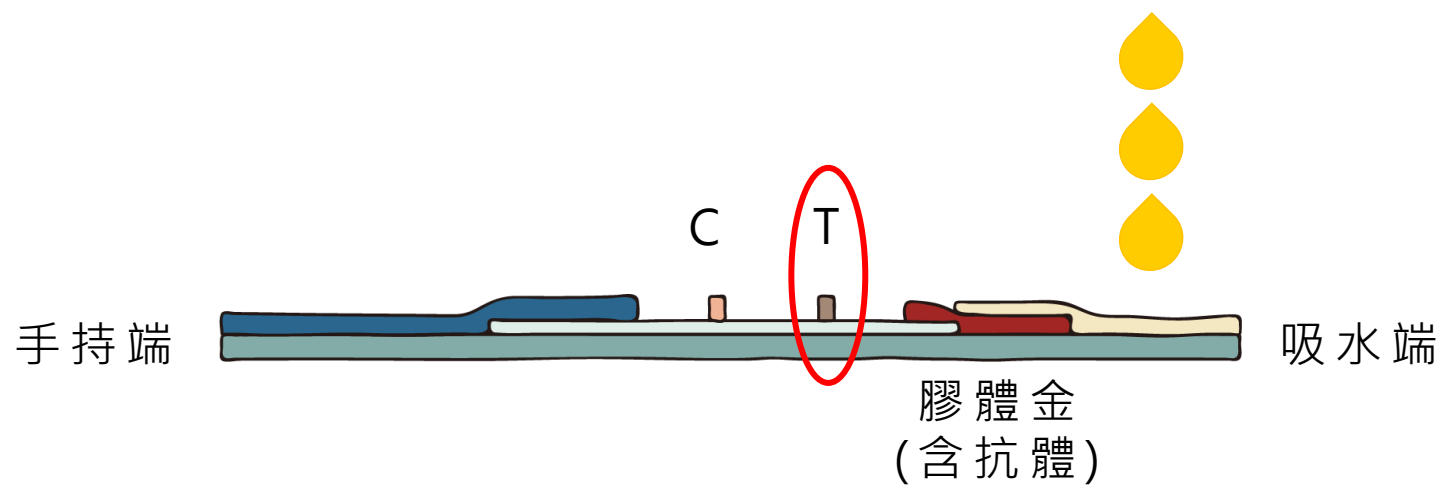


陽性反應

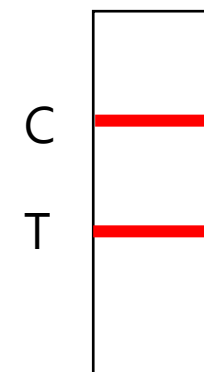

陰性反應

儲存及操作環境-室溫

- 試劑存放
- 實際操作
- 使用檢體

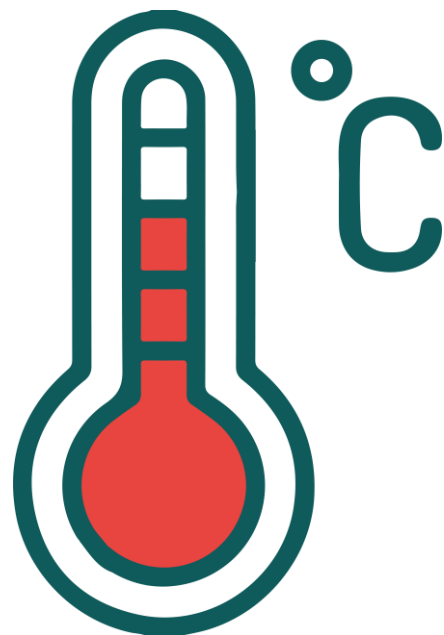

若取得尿液當下無法立即檢測，建議存放於2-8℃，
若存放超過48小時，需重新採集檢體進行檢測。

注意事項

- 檢測結果僅作為初步篩檢之用，若懷疑有藥物濫用情形，建議可至衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構進行確認檢驗
- 有效期限 EXP
- 避免曝曬於陽光下
- 鋁箔包開封後應立即使用
- 本試劑不可重複使用


自備器材



試劑操作步驟（一）

檢查鋁箔袋包裝是否完整，是否過期。

(EXP：效期；LOT：批號)

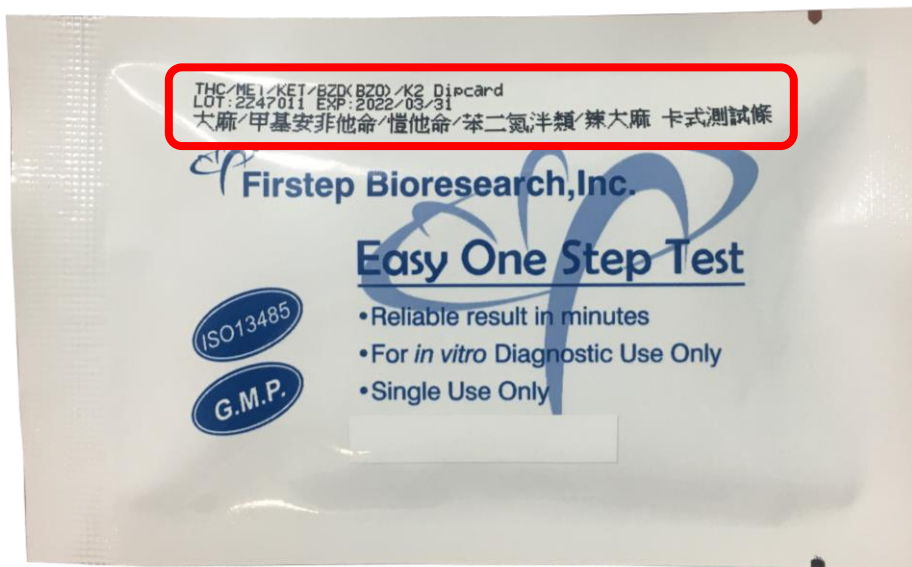

正面



反面

試劑操作步驟 (二)



試劑卡




小滴管



乾燥劑

試劑操作步驟 (三)


- 若檢體由冰箱取出，應於測試前使檢體回溫至室溫！

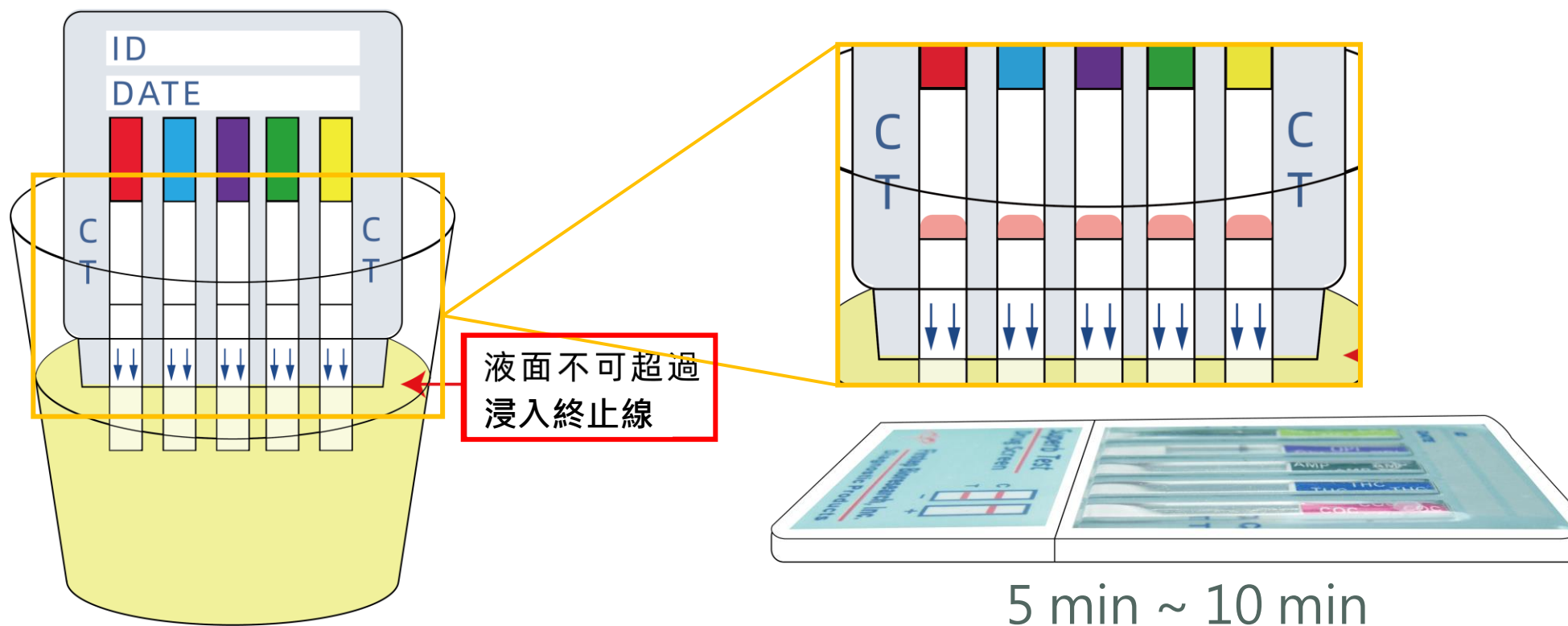


結果判讀

靜置五分鐘後判讀結果，超過十分鐘請勿判讀。


* 每一試紙條均代表不同之毒品檢測，結果需分開判讀！

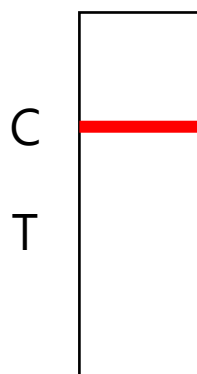

陽性反應

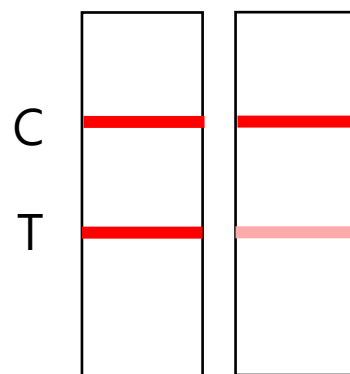




陰性反應

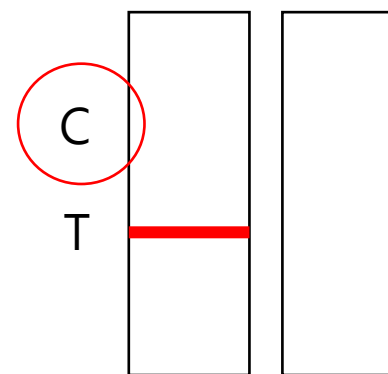

無效反應

品質管制

- C線為本試劑組內建品管指示線。
- 若測試後無C線出現，即表示檢測有誤。應重新使用新的測試匣再作測試。

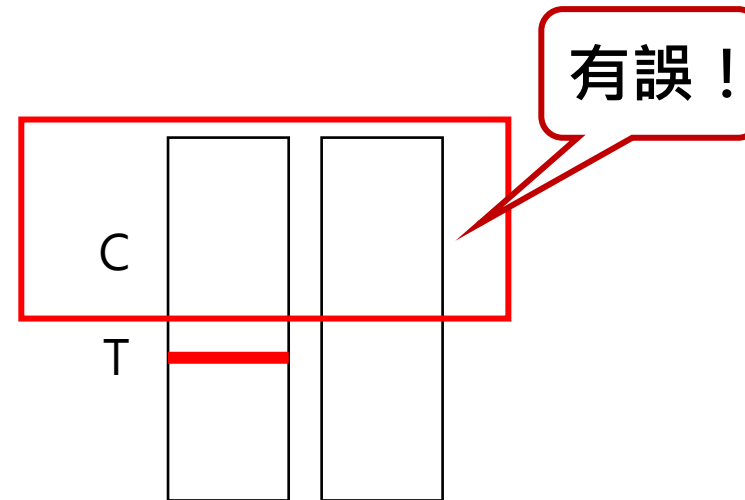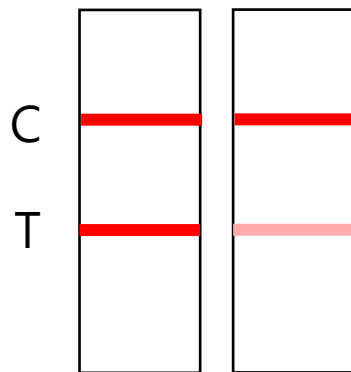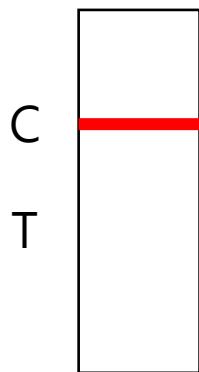

聯準生技

第二次特定人員尿液篩檢協調會

聯絡人：戴筱筠

TEL : 04-23266366#201

LINE ID : 0977689806

Thanks for
your attention!